

Eldobható sebészeti szájmazsk

Kezelési és használati utasítás

Az eszközt az orvos vagy más személy orra szája elé kell helyezni, hogy megvédje a viselőjét a fertőzésektől, megakadályozza a levegőben terjedő organizmusok terjedését műtét vagy betegvizsgálat során.

Egyszer használatos.

Figyelem

- Egyszer használatos. Felhasználás után nem használható fel újra.
- Használat közben, ha irritálja a bőrt vagy ha a légzést nehezített kérjük cserélje le a maszkot vagy hagyja abba a használatát.
- Amennyiben a csomagolás használat előtt megsérült a maszk használata szigorúan tilos.
- Nyílt lángtól és hőtől távol tartandó.
- Kerülje a poros, ártalmas gázokat tartalmazó helyiségeket.
- A maszkot ne érintse újjal kézzel.
- A maszk eltávolítása után a kezét fertőtlenítse (teles kézfertőtlenítés.)
- Viselés közben a maszk takarja az orrot és a száját, és ne lógjon a viselője nyakában.
- Használat után a maszkot ártalmatlanítani kell. Ha további védelemre van szüksége vegye fel új maszkot.

Használati útmutató

1 Helyezze a maszkot az orr és száj elé.

2 Rögzítse a pántokat a fülére.

3 Hajtsa a drótot az orrnyergére.

4 Állítsa be a maszkot úgy, hogy tökéletesen illeszkedjen az arc görbületéhez.

A termék pp nem szőtt anyagból, puha drótból és pántokból áll.

Tárolási feltételek: 50 Celsius fok hőmérséklet alatt, fénytől védve, száraz, jól szellőző helyen tárolandó.

Szavatossági idő: Az eldobható sebészeti szájmazsk a fenti tárolási feltételek mellett 3 évig használható fel.